


医院硬式内镜器械的处置流程

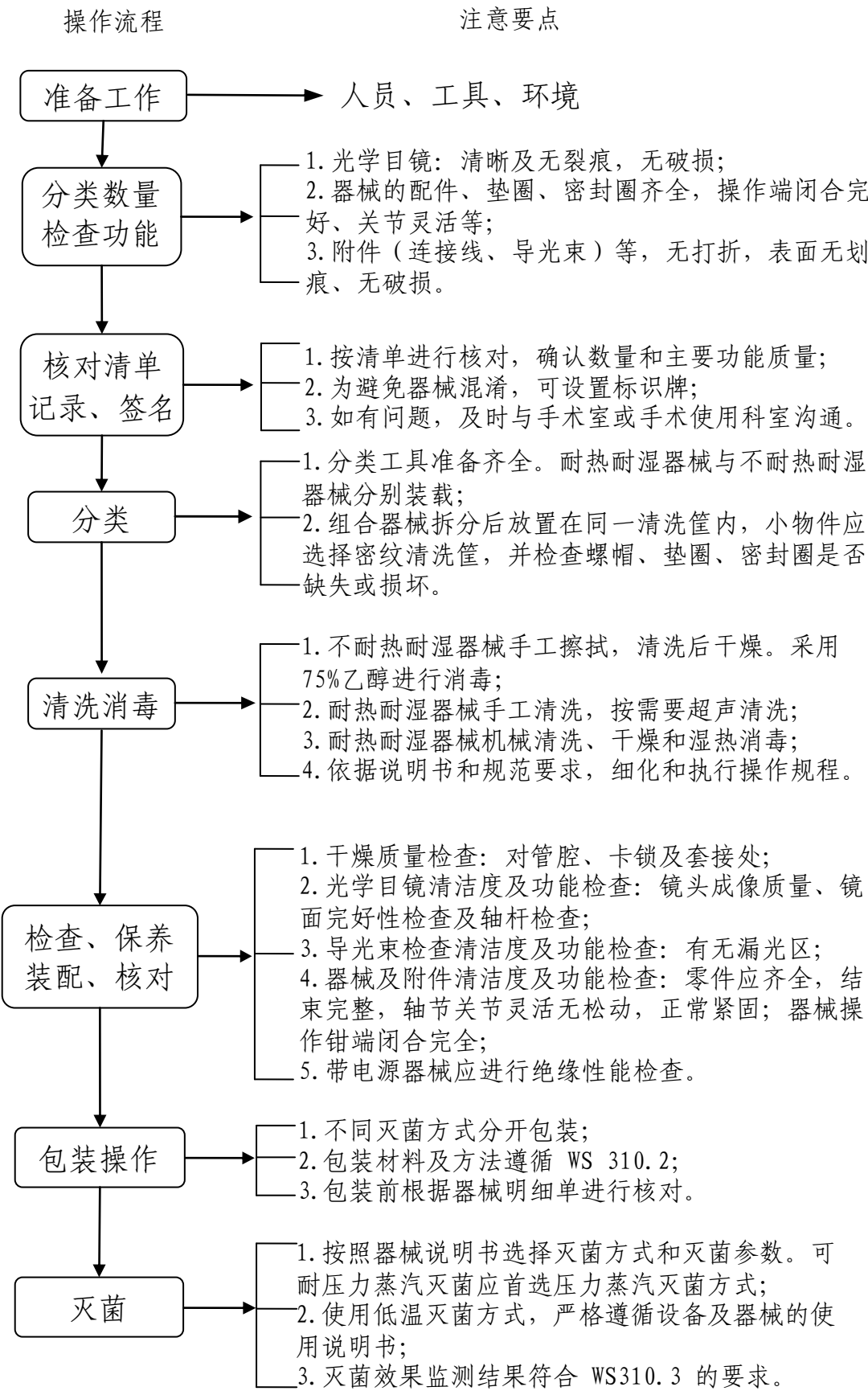

示例：硬式内镜器械功能检查操作规程（分离钳，抓钳）

操作流程

注意要点

1. 人员准备：要求着装、洗手；
2. 备物：放大镜、95%酒精、吸水纸、毛刷、气枪、绝缘检测仪。

手柄的检查：

1. 检查外观，通电柱，锁扣；
2. 检查螺丝齐全；
3. 清洁度检查。无水迹，污迹；
4. 把手灵活度好、锁扣功能好；
5. 绝缘性能完好。

套管的检查：

1. 检查套管外表完好，无破损，无水迹，污迹；
2. 检查外套前端内壁2片铁片完好；
3. 检查套管内壁清洁度：可用湿白棉条贯通整个管腔，看棉条的颜色判断清洗质量；
4. 绝缘性能完好。

钳芯的检查：

1. 检查钳芯外观平直，钳端无断裂，缺损，剪芯无缺口；
2. 检查钳端清洁，无污迹，锈迹。

组装后功能的检查：

1. 钳端闭合、张开灵活，咬合完好；
2. 锁扣功能完好，灵活。



示例：硬式内镜器械的功能检查操作规程（导光束）

操作流程

注意要点

准备：

1. 人员着装符合要求、洗手；
2. 备物：放大镜、95%酒精、吸水纸、绝缘检测仪。

导线的检查：

1. 检查导线清洁度。外表及两端清洁，无白斑、污物、无血迹；
2. 检查导线外皮完好，无破损；
3. 绝缘性能完好。



超声刀手柄的检查：

1. 检查导线外表清洁无油污、表皮完好，无破损；
2. 检查通电柱平直，无偏移；
3. 超声刀手柄与导线连接处无断裂；
4. 螺丝不滑丝，表面无脱落。



导光束功能的检查：

1. 检查外表清洁无油污、无破裂、缺损，冷光源端无烧灼；
2. 检查导光性能完好。将导光束的一端对室内光源，在导光束一端移动大拇指，检查另一端有无漏光区。



导线类器械的装载方法：包装时注意保护导线。

1. 大弧度盘旋导线，直径大于10CM，无锐角；
2. 靠近接头处保持伸直状态。



硬式内镜器械的功能检查操作规程（光学目镜）

操作流程

注意要点

1. 人员要求着装、洗手；
2. 备物：放大镜、95%酒精、吸水纸、光学镜头擦试纸、棉球。

光学目镜清洁度的检查：

1. 检查镜面有无白斑、污物、血迹；
2. 镜面用光学镜头擦试纸擦拭；
3. 镜杆用吸水纸蘸 95%酒精擦拭。



光学目镜配件的检查：

- 1、STORZ 镜头光纤处有2个配件；
- 2、连体奥林巴斯30度镜光纤处有1个配件；
- 3、分体奥林巴斯30度镜没有配件。



光学镜头外观的检查：

1. 检查镜杆杠轴平直、外表无凹陷、刮花、缺损，电灼伤。目镜无破裂；
- 2、导光束接口透亮，无污迹。



光学镜头功能的检查：

1. 检查镜头两端镜面无裂缝，刮痕；
2. 将镜头对准参照物 5CM 缓慢旋转 360 度进行目测，镜头的成像清晰，无黑影、雾气、破裂、偏移；
- 3, 检查导光性能，将镜头物镜端对室内光源，在导光束接口端移动大母指，检查物镜端有无漏光区。



光学目镜的装载

1. 使用有固定卡的专用装载筐；
2. 目镜两端不能接触装载筐；
3. 包装标识清晰齐全，信息可追溯。

